

機器のお手入れ

清掃時には電池を取り外し、消毒液を含ませた脱脂綿またはやわらかい布できれいにしてください。その後、ぬるま湯や水を含ませた脱脂綿またはやわらかい布で消毒液を拭き取ってください。清掃後は十分に乾燥させてください。

使用できる消毒液は以下の通りです。

成分名	主な製品名と販売会社		上限濃度
エタノール	消毒用エタノール	健栄製薬 (株)	1 倍液
クレゾール石鹼	クレゾール石鹼	健栄製薬 (株)	33 倍液
次亜塩素酸ナトリウム	病院用ハイター	花王 (株)	100 倍液
アルキルアミンオキシド 水酸化カリウム 第四級アンモニウム塩	クリンキーパー	花王 (株)	20 倍液
塩化ベンザルコニウム	オスパン液 10%	武田製薬工業 (株)	20 倍液
クロルヘキシジングルコン酸塩	ヒビテン液 5%	住友ファーマ (株)	10 倍液
アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩	テゴー 51 10%	アルフレッサファーマ(株)	20 倍液
第四級アンモニウム塩 界面活性剤 アルカリ剤	環境清掃 ウェットクロス	スリーエムジャパン(株)	—
第四級アンモニウム塩 界面活性剤	クリアパワー	白十字 (株)	—
エタノール	ショードック スーパー	白十字 (株)	—
エタノール	ワンショットプラス EL-II	白十字 (株)	—
加速化過酸化水素	ハイプロックス ワイプ	東栄部品 (株)	—
アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩	0.5w/v% ハイジェル水	丸石製薬 (株)	1 倍液
イソプロパノール	70% イソプロピルアルコール	丸石製薬 (株)	1 倍液

上限濃度を超えた濃度の消毒液を使用した場合は、本体が劣化するおそれがあります。消毒液の使用にあたっては、各消毒液の注意事項および用法・用量に従ってください。