

**NISSEI**® 光電式脈拍モニター

**PULSE RATE MONITOR**

**HR-40 パルスコーチ neo**®

PC通信インターフェース  
キット

**OIF-10**

ご利用の手引き  
インストール手順書

©Copyright 2008 by NIHON SEIMITSU CO.,LTD All right reserved.

Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Adobe®, AdobeAcrobat® および Acrobat Reader® はアドビシステムズ社の米国および／または各国での商標または登録商標です。

**NIHON SEI**®, **パルスコ**® および **パルスコ** ® は日本精密測器株式会社の登録商標です。

# もくじ

---

OF-10について .....	4
使用上の注意 .....	6
アプリケーションのインストール .....	7
ドライバのインストール (Windows 98SE/Me) .....	8
インストールが完了しない .....	11
ドライバのインストール (Windows 2000/XP/Vista) .....	13

# OIF-10について

この度はOIF-10をお買い上げいただきありがとうございます。

OIF-10は**NISSEI**光電式脈拍モニター HR-40 **パルスコーチ<sup>meo</sup>**で記録した脈拍数をコンピュータ上で管理するソフトウェアキットです。

## 製品内容物



### インターフェースユニット UIF-100

受信部  
脈拍モニターに  
接続します




USBコネクタ  
パーソナルコン  
ピュータのUSB  
ポートに接続  
します

脈拍モニター  
インターフェース  
接続部

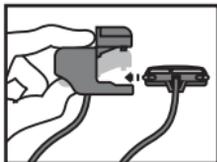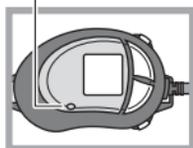

### CD-ROM

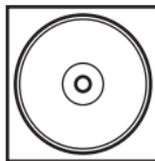

アプリケーション、  
ドライバインストール用

ご利用の手引き  
インストール手順書  
(本書)



---

## OIF-10の動作環境

対応機種	: USBポート (USB1.1またはUSB2.0) 標準搭載DOS/V ※USBハブの使用は不可
対応OS	: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista (日本語版)
CPU	: intel Pentium3 800MHz以上または同等性能の交換CPU
メモリ	: 256MB以上
ハードディスク	: OIF-10のインストール用10MB以上 ※データの保存用 に別途空き容量が必要
CD-ROMドライブ	: アプリケーションインストールに必要
解像度	: 1024×768以上
色	: 24Bit以上
ソフト	: Microsoft Excel 2000、2003、または2007がインストール 済みであること ※OIF取扱説明書の利用にはAdobe AcrobatまたはAcrobat Reader等が必要

## インターフェースユニットの仕様

重量	: 約50g
ケーブル	: 1.5m
寿命	: 5年
使用温度	: 10~40℃
保存温度	: -20~50℃ (相対湿度85%以下)
消費電力	: 70mW以下

本製品はバルク等を使用して組み立てたオリジナルコンピュータでは動作しません。  
また、コンピュータの互換性によって、一部コンピュータが動作しない恐れがあります。

# 使用上の注意

---

製品の動作環境、使用／保管環境等をお守りください。

インターフェースを指定外のものに接続しないでください。

インターフェースの接続や取り外しで無理な力を与えたり、ケーブルをもって取り外しをおこなったりしないでください。

直射日光の当たる場所、温度差の激しい場所、湿度の高い場所、ほこりの多い場所に保管しないでください。

落としたりたたいたりしないでください。

分解、改造はおこなわないでください。

製品のよごれはやわらかい布で拭き取ってください。ガソリン、シンナー、アルコール等は使用しないでください。

本製品は脈拍モニターで記録した脈拍数に加え、体重、血圧等の健康状態をコンピュータ上で管理するためのものですが、ご自身での適切な運動量や薬剤の投与等の判断はせず、必ず専門の医師やトレーナーにご相談ください。

# アプリケーションのインストール

---

インストールは「管理者権限」のあるユーザーで行ってください。

OIF-10インストールCD-ROMをコンピュータに挿入するとアプリケーションのインストールプログラムが自動的に起動します。

起動しない場合には、スタートメニューの〔ファイルを指定して実行〕でCD-ROMの中の〔setup.exe〕を指定してください。

契約許諾書をお読みになり、インストールプログラム画面の指示に従いアプリケーションをインストールしてください。

アプリケーションがインストールされると、ウィンドウズスタートメニューにOIFの起動、アンインストール、取扱説明書（PDF）が追加されます。

OIFの起動前にインターフェースドライバのインストールを行ってください。

# ドライバのインストール ( Windows 98SE/Me )


UIFのUSBコネクタをコンピュータのUSBポートに差し込むと、新しいハードウェアの追加ウィザードが起動します。コンピュータの画面の指示に従いインターフェース(デバイス)の認識、ドライバのインストールをおこなってください。

ドライバの検索方法は「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」を選び、「次へ」をクリックしてください。



クリック

ドライバはCD-ROMから参照しインターフェースを認識させます。「ディスク使用」をクリックしてください。

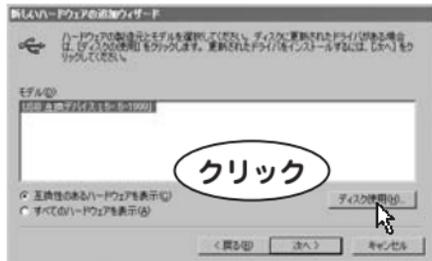



インターフェイスがUIF-100-01として認識されます。

[次へ] をクリックし、画面の指示に従いインターフェースドライバファイルをインストールしてください。

右のウィンドウが表示されるとドライバインストールの完了です。



## ❓ インストールが完了しない

お使いのコンピュータにUSBの作動に必要なファイルがインストールされていない場合、インストールの途中で右のウィンドウが表示されます。

OIFのCD-ROMを取り出し、お使いのコンピュータのWindowsのCD-ROMを挿入して [OK] をクリックしてください。不足しているファイルのコピーが開始します。

ファイルのコピーが終了したら [完了] をクリックし、画面の指示に従い、インストールを進めてください。

再起動の指示が表示された場合にはWindowsのCD-ROMを取り出し、OIFのCD-ROMを挿入してから再起動させてください。



ドライバの検索方法の選択ウィンドウが表示されたら [特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する] を選択し [次へ] をクリックしてください。



クリック


[ディスク使用] をクリックして CD-ROMからドライバを選択します。

モデル名等の変更はしないでください。



クリック

8ページからの手順同様、コンピュータにインターフェースを認識させ、ドライバのインストールを完了させてください。

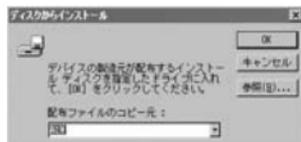


# ドライバのインストール (Windows 2000/XP/Vista)

UIFのUSBコネクタをコンピュータのUSBポートに差し込むと、新しいハードウェアの検出ウィザードが起動します。  
画面の指示に従いドライバのインストールをおこなってください。

インストール方法は [一覧または特定の場所からインストールする] を選び、 [次へ] 進みます。




CD-ROMを挿入し、インストールのオプションで [参照] をクリックしてください。

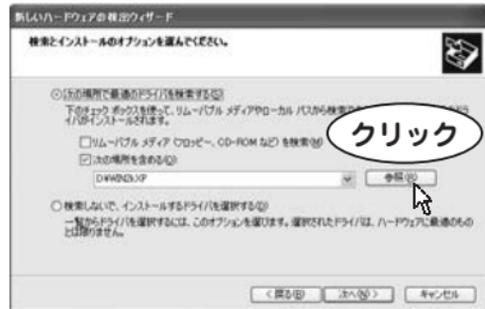

USBドライバフォルダ内のWIN2kXP  
フォルダを選択してください。



フォルダを指定したら [次へ] を  
クリックします。

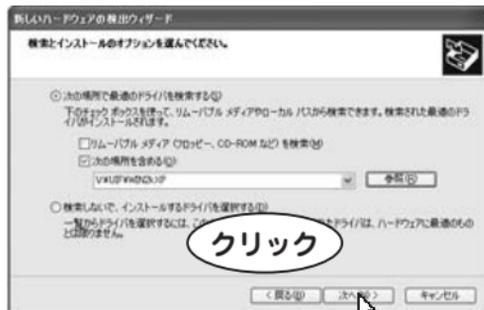

右の画面が表示された場合には  
[続行] をクリックしてインストールを  
続けます。



インストール完了ウィンドウが表示  
されたら [完了] をクリックしてくだ  
さい。



# 品質保証書

このたびは **NISSEI** 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は高度な技術と徹底した生産管理そして厳重な品質検査を経てつくられた製品です。しかし通常のご利用において万一不具合が発生したときは、下記の保証規定により修理及び調整をいたします。 **本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.**

製造販売元 日本精密測器株式会社

本社・工場 〒377-0293 群馬県渋川市中郷2508-13 ☎0279-20-2311(代)  
東京支社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-13シート第2ビル3階 ☎03-5842-6611(代)  
お客様相談室 ☎0120-211-164 (9:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)  
ホームページ <http://www.nissei-kk.co.jp/>

お名前 _____ 様	お買い上げ年月日 _____
お電話 _____	販売店 (店名・住所・電話)
ご住所 _____	販売店にて記入捺印していただいて (印) ください。

## 保証規定

有効保証期間はお買い上げ後1年間です。取扱説明書に従った正常なご使用状態で、万一故障した場合は無料で修理をします。保証期間内に無料修理を受けられるときは、商品に本書を添えて、お買い上げいただいた販売店までお持ちください。修理品を直接送付される際の送料は、お客様でご負担ください。本保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- 1) 誤った使用や、不注意による故障または損傷。
- 2) 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
- 3) 不当な修理や改造による故障または損傷。
- 4) 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の使用電源及びその他の天災地変や衝撃等による故障または損傷。
- 5) 一般家庭以外（公共の場所等）でのご使用による故障または損傷。
- 6) 本保証書の提示がない場合。
- 7) 本保証書に販売店、お買い上げ日等の記載の不備がある場合。あるいは内容を書き替えられた場合。
- 8) ご使用後の外装面の傷、破損、および外装部品、付属品の交換。