

品質保証書

このたびは、**NISSEI** 血圧計をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

本機は、高度な技術と徹底した生産管理そして厳重な品質検査を経てつくられた製品です。しかし通常のご利用において万一不具合が発生したときは、裏面の保証規定により修理および調整をいたします。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

品名/型式	デジタル血圧計 WS-710	製造番号	
お名前	様		
お電話	()		
ご住所	〒		
お買い上げ年月日	年	月	日
販売店 (店名・住所・電話)			
販売店にて記入捺印して いただいでください。	印		

NISSEI 日本精密測器株式会社

本社・工場 〒377-0293 群馬県渋川市中郷2508-13 ☎0279-20-2311(代)
 東京支社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-13 シード第2ビル3階
 ☎03-5842-6611(代)
 お客様相談室 ☎0120-211-164(9:00~17:00 土日祝祭日を除く)
 ホームページ <http://www.nissei-kk.co.jp/>

NISSEI ドットマトリックス手首式

デジタル血圧計 簡単 ファジィ

WS-710 取扱説明書

お買い上げいただきまして
ありがとうございました。

この説明書と保証書を
よくお読みのうえ、正しく
お使いください。

そのあと大切に保管し、
必要なときお読みください。



製造販売元 日本精密測器株式会社
 〒377-0293 群馬県渋川市中郷2508-13
 ☎0279-20-2311(代)
 製造元 日本精密測器株式会社 子持工場

A107166-1-D

WS-710-11_トリアクテメソ_A107166-1-B_p22

安全上のご注意

注意 誤った取り扱いをすると人が損害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

禁止(してはいけないこと) を示します。

透析療法中、又は抗凝固剤、抗血小板剤、ステロイド剤等をご使用の方は、医師の指示なしで使用しない。
内出血を起こす可能性があります。

血圧測定の目的以外には使用しない。故障や事故の原因になります。

お子様だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない。
けがの恐れがあります。

本機の近くで携帯電話を使用しない。誤動作する恐れがあります。

強い静電気や電磁波に近づけない。誤動作や故障の原因になります。

可燃性雰囲気内で使用しない。故障や事故の原因になります。

分解・修理・改造は行わない。

強制(必ず守ること) を示します。

測定結果の自己診断、治療は危険です。
医師の指導に基づいて測定し、診断を受けましょう。
薬剤の服用は医師の指示に従ってください。

動かなくなったり、異常がある場合は、直ちに使用を中止する。
点検・修理をお申し付けください。

本製品および使用済みの電池を廃棄する場合は、各自治体の規則に従い適切に処分する。

仕様

品名	デジタル血圧計
型式	WS-710
測定方法	オシロメトリック法
表示	102 x 64 ドット液晶
圧力表示範囲	0 ~ 300 mmHg / 断続指示間隔1mmHg (目量)
測定範囲	50 ~ 250 mmHg (最高血圧) 40 ~ 180 mmHg (最低血圧) 40 ~ 160 拍/分 (脈拍)
精度	±4 mmHg以内 (圧力) / ±5 %以内 (脈拍)
加圧	自動 (エアポンプ)
減圧	自動 (電子制御弁)
排気	自動急速排気弁
電源	単4アルカリ電池2本
メモリー	30回分の測定結果(血圧値、脈拍)とその平均値 x 2
設定加圧	180 ~ 240 mmHg (10mmHg単位)
使用環境	+10 ~ +40 °C / 相対湿度 30% ~ 85% (室内)
保管環境	-20 ~ +50 °C / 相対湿度 15% ~ 90% (室内)
カフ	種類 スプリングカフ
手首周囲	125 ~ 205 mm
本体	
寸法	84.6 (横) x 75.6 (縦) x 31.5 (高) mm
重さ	約 112 g (電池を含まない)
付属品	添付文書、取扱説明書、単4アルカリ電池2本、キャリングケース
電撃保護	内部電源機器 ☑ : BFF形装着部
△	付属文書をお読みください

お断りなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
本機は、EMC規格(IEC60601-1-2:1993)*に適合しております。

*EMC規格/テレビ、ラジオ、コンピュータなどに妨害を与えたり、電波や静電気などによる誤動作を防止するための国際規格です。